

UTILIZACIÓN LEJÍA DESINFECCIÓN GAFA/PANTALLAS FACIALES

Nota de utilización y diluciones de Lejía para desinfección de gafas y pantallas faciales

Lavar las gafas o pantalla **con agua y jabón** (neutro o enzimático según disponibilidad) y **Aclara** con agua corriente.

Por **cada litro de agua, echar 100 ml de lejía** comercial (concentración 1:10). Muy importante medir bien la cantidad de lejía.

Sumergir completamente las gafas o las pantallas faciales durante **5 minutos**.

Aclarar y secar, quedando disponibles para un nuevo uso.

Tirar la solución tras finalizar la desinfección. La solución preparada podrá ser utilizada de nuevo si se usa inmediatamente y como norma general hasta un máximo de 3 usos seguidos

*Fuente: Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente HUMV
(Revisión 1; Fecha elaboración: 17/03/2020)*